

## Alle kender til problemer med propper i ørene

Propper i ørerne viser sig når man flyver eller er under vandet og meget ofte i forbindelse med forkølelse eller allergi. En trommehinde udsat for overtryk kan være meget smertefuld, medføre nedsat hørelse og føre til langvarige problemer hvis trykket ikke udlignes.



## EarPopper fjerner propper i ørerne som skyldes

- Flyvning
- Allergi
- Svømning
- Dykning
- Forkølelse




## EarPopper behandler problemets årsag: tilstopning af det eustatiske rør


Det eustatiske rør er kroppens eneste mulighed for at udligne tryk og sikre ventilation til mellemøret. Det eustatiske rør åbner sig når du synker eller gaber.

Hvis det eustatiske rør ikke er åbent vil det medføre, at mellemøret bliver et lukket, ubalanceret område som påvirker hørelsen med et øget tryk indefra. Eventuelle væskeansamlinger kan ikke drænes og vil samle sig bag trommehinden.

Earpopper sikrer fri adgang og udligner tryk i mellemøret. I samme øjeblik du synker, sikrer Earpopper at frisk luft kan få adgang til mellemøret gennem det eustatiske rør og eventuel væske drænes.

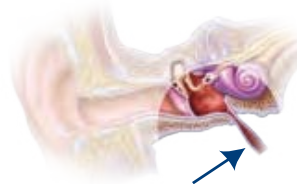

Åbent eustatisk rør

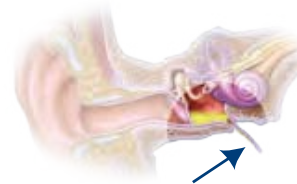

Lukket eustatisk rør

## Hvordan bruger du EarPopper:

- 1 Tryk EarPopper mod næseboret, således at luften ikke kan komme ud, og luk det andet næsebor med en finger.
- 2 Tryk på startknappen, vent 2-3 sekunder og synk derefter mens apparatet arbejder.
- 3 Gentag proceduren i det andet næsebor. Efter 5 minutter gentages trin 1 og 2 for at sikre, at behandlingen virker.



EarPopper - ikke-invasiv behandling uden medicin