

Kort vejledning til kolesterol- og triglyceridmåling



1) Indsæt datachippen

Indsæt datachippen. Du kan kun foretage en korrekt måling, hvis du bruger den datachip som ligger i emballagen med de stiks du har valgt til din måling.



2) Tjek at nummeret er identisk.

På skærmen vil der fremkomme et datachip-nummer som skal være identisk med det nummer, som er trykt på emballagen.



3) Indsæt en stiks.

Indsæt en stiks fra det rør hvorfra du har taget chippen. Apparatet tænder automatisk.



4) Påføring af blod

Anvend fingerprikkeren til at frembringe en bloddråbe på fingerspidsen og afsæt bloddråben i det cirkulære hvide område på den del af stiksen der stikker ud af apparatet. Mængden af blod skal være tilstrækkelig til at danne en hvælvet form på stiksen. Afvent at der fremkommer et cirkulerende skærbillede.



5) Tjek resultatet

Efter kort tid fremkommer resultatet af kolesterol- eller triglyceridmålingen på skærmen. Resultatet står med tydelige og letlæselige tal.



6) Udskydning af den brugte stiks.

Efter at have udført målingen kan stiksen skydes ud (uden at man berører blodprøven) ved at trykke på knappen på bagsiden af apparatet.